



# GEBRUIKSAANWIJZING

---

## Siliconen oordopjes

Geluidsdemping -32dB



## **Welkom**

Bedankt dat je hebt gekozen voor de geluidsdempende oordopjes van AXIMO. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften op voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over de oordopjes, neem dan contact met ons op via email: [info@aximo.nl](mailto:info@aximo.nl)

## **Introductie**

De AXIMO siliconen oordopjes met unieke membraantechnologie zijn ontworpen om je oren te beschermen en tegelijkertijd de juiste balans van helderheid van het geluid te behouden. Geniet van concerten, clubs, festivals of andere luide evenementen op een lager volume zonder geluidskwaliteit in te leveren. De filters verminderen en dempen geluid en achtergrondruis, zodat je ongestoord kunt genieten of rustig kunt werken in een drukke omgeving.

Deze oordoppen hebben een hoge geluidsdemping van maar liefst 32dB, waardoor je snurkgeluiden, verkeer en andere storende geluiden niet meer hoort.

## **Oordoppen plaatsen:**

1. Zorg ervoor dat de oordopjes schoon zijn voordat je ze inbrengt.
2. Hou het uiteinde van de oordopjes tussen je duim en wijsvinger.
3. Gebruik je beschikbare hand om het inbrengen te vergemakkelijken.  
Trek de bovenkant van je oor naar buiten en naar boven, hierdoor wordt de gehoorgang recht zodat het oordopje gemakkelijk en effectief in het oor past.
4. Druk en draai het oordopje zachtjes tot het comfortabel in de gehoorgang zit en de gehoorgang comfortabel afsluit. Steek het oordopje niet te ver in je oor en zorg ervoor dat het oordopje voldoende uitsteekt, zodat je het gemakkelijk kunt verwijderen na gebruik.
5. Probeer de juiste maat van de siliconen doppen voor een juiste aansluiting in je oor.
6. Gebruik bij het inbrengen je duim en zet voldoende druk zodat het oordopje langzaam het oor in beweegt.
7. Op de oordop staat een L voor linkeroor en R voor rechteroor.
8. Het "staartje" van de oordop moet meelopen met de oorschelp.



### **Oordoppen verwijderen:**

1. Om te verwijderen pak je voorzichtig het uiteinde van het oordopje met duim en wijsvinger en trek het oordopje langzaam uit het oor.
2. Het is raadzaam om de oordopjes na gebruik te reinigen met een vochtige doek voordat je ze in opbergt in het doosje.

Denk eraan, het verwijderen mag geen pijnlijke procedure zijn. Wees voorzichtig bij het inbrengen en verwijderen van de oordopjes en neem contact op met een arts als je medische problemen hebt met je oren.

De doelmatigheid van de oordopjes hangt af van een aantal factoren, waaronder de grootte en vorm van de oren van de gebruiker en het geluidsniveau waarbij de oordopjes worden gebruikt.

### **Reiniging:**

1. De oordopjes zijn herbruikbaar en moeten regelmatig op bruikbaarheid worden gecontroleerd.
2. Bewaar de oordopjes na gebruik op een droge plaats.
3. Was de oordopjes met neutrale zeep en lauw water om ze te reinigen en te desinfecteren.
4. Droog de oordopjes voordat je ze in het oor stopt. Gebruik de oordopjes tussen -20°C en 35°C.
5. Laat de oordopjes nooit boven de 55°C komen.
6. Stop met het dragen van de oordopjes als er tekenen van schade of slijtage zijn en vervang de beschadigde onderdelen om de levensduur van het product zo lang mogelijk te laten duren.

## **Waarschuwing:**

### **Buiten bereik van baby's en kleine kinderen houden.**

1. Dit product is niet giftig, maar kan de ademhaling belemmeren als het in de luchtpijp terechtkomt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
2. Verkeerd gebruik of veronachtzaming van bovenstaande aanbevelingen vermindert de effectiviteit en kan leiden tot gehoorverlies of letsel. De oordopjes moeten worden gebruikt, afgesteld en onderhouden volgens deze instructies.
3. De oordopjes moeten altijd worden gedragen in een omgeving met lawaai of veel geluid.
4. Als de bovenstaande aanbevelingen niet worden opgevolgd, wordt de bescherming die de oordopjes bieden ernstig aangetast.

## **Garantie**

Wij garanderen de werking voor de oordopjes voor één jaar na datum van aankoop. Neem altijd eerst contact met ons op en stuur de oordopjes niet eerst retour.

De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. De garantie vervalt ook als een schade is ontstaan door onjuist gebruik of gebrekkig onderhoud. Voor het juist gebruik dien je de instructies in deze handleiding op te volgen.


Heb je nog vragen, laat het ons gerust weten. We staan klaar om je te helpen.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop.

Met vriendelijke groet,

AXIMO - Team  
info@aximo.nl

Recycle de verpakking op milieuvriendelijke wijze

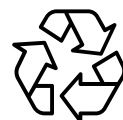

**RoHS**